


DYNASYST™ ORFITUBE™ ADJUSTER KIT

A. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT

ORFITUBE ADJUSTER est une unité structurale à placer sur une orthèse de main afin de lui donner une action ajustable et dynamique. L'orthèse dynamique peut être définie comme étant du type 'stabilisateur avec élastique'.


Le stabilisateur est réglable, car les indices biomécaniques peuvent changer avec le temps.

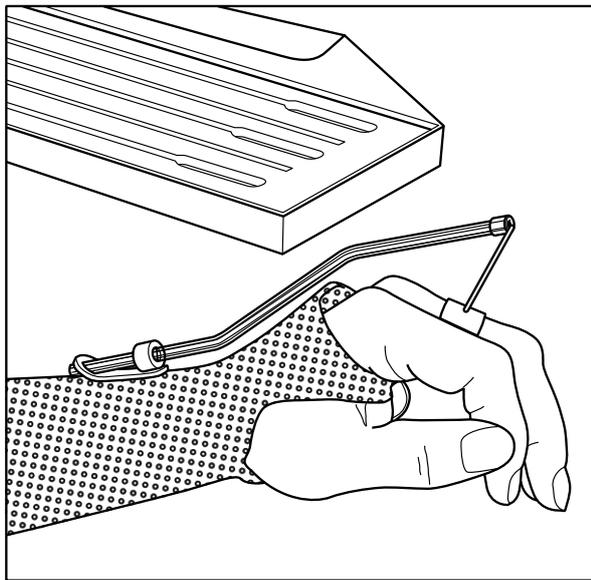


B. GAMME DE PRODUITS

N° d'Art.	Description
35305	5x SINGLE ORFITUBE ADJUSTER
	5x ORFITUBE
	5x ORFITUBE END
	1x tige de pliage
	1x ORFITUBE ADJUSTER - SET MODE D'EMPLOI
	1x Clé à 6 pans

SINGLE ORFITUBE ADJUSTER:

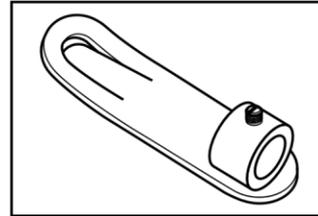


Vis de réglage (acier inoxydable): sécurise la position de l'ORFITUBE dans la bague de réglage.

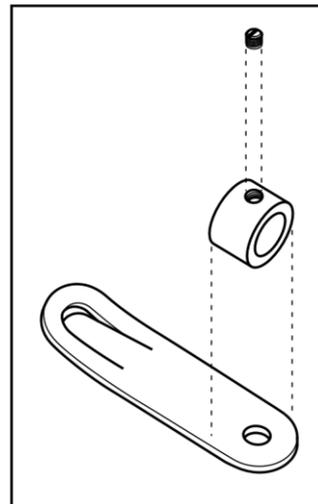

Bague de réglage (Polyacétal): Maintient et permet de modifier l'ORFITUBE.


Plaque de fixation (ORFIT): attache et stabilise l'ADJUSTER à une orthèse.

ORFITUBE™:

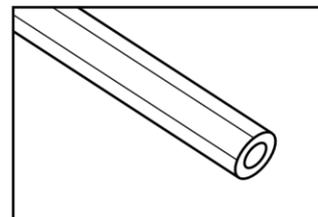


Tube (polycarbonate), dans lequel un ressort tressé ou un ressort de traction est introduit, fournit un point de suspension spatial pour le doigt.

TUBE END:

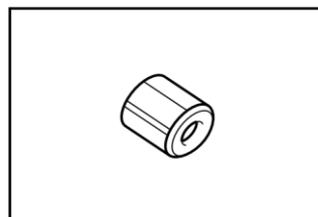

Bouchon métallique (laiton nickelé) à bords arrondis pour réduire le frottement de l'élastique.


Bending thread:

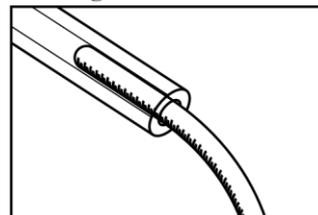


Fil synthétique utilisé pour éviter les déformations lors de la mise en forme de l'ORFITUBE.

C. TECHNIQUE D'APPLICATION


1. Mettez une orthèse de base sur le patient.

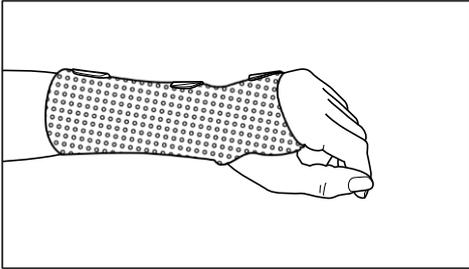

2. Déterminez dans quel plan le point de suspension doit être réglable (A).

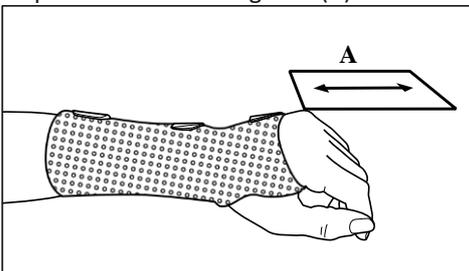


3. Trouvez un emplacement sur l'orthèse ± parallèle à ce plan (A').

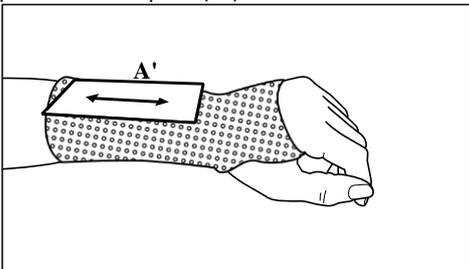


4. Tirez l'ORFITUBE à travers l'ADJUSTER sur la distance de réglage prévue et serrez la vis de la bague de réglage.

5. Si ORFITUBE s'adapte à l'orthèse sans plier, continuez avec le point 10.


6. Pour courber l'ORTFUBE, introduisez d'abord la tige de cintrage jusqu'au-delà de la bague de réglage.

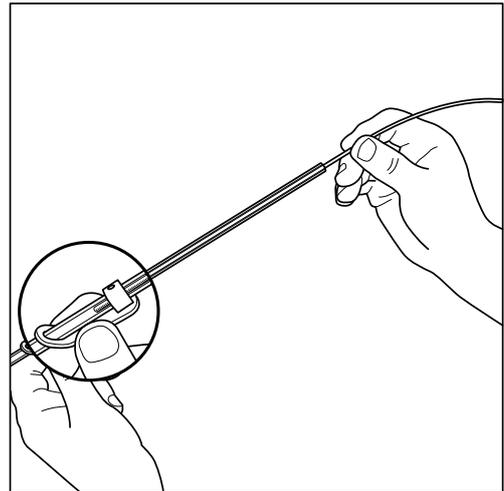

7. Pliez l'ORTFUBE à l'angle désiré.

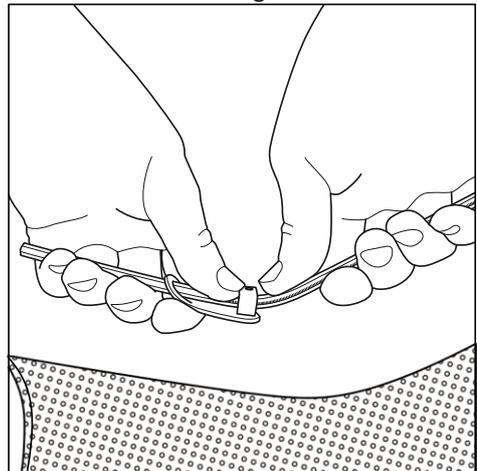


8. Retirez la tige de pliage de l'angle et, si nécessaire, effectuez des courbures supplémentaires pour aboutir à nouveau dans le plan de réglage.

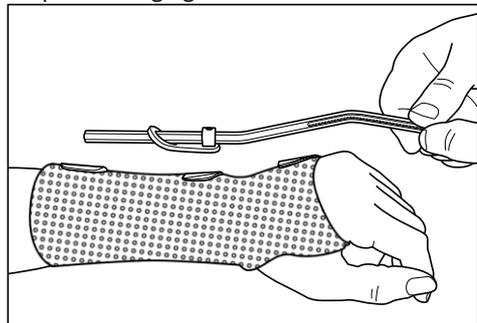


9. Retirez complètement la tige de pliage du tube.


10. Maintenant, glissez l'ORFITUBE dans l'ADJUSTER jusqu'à sa position la plus distale.

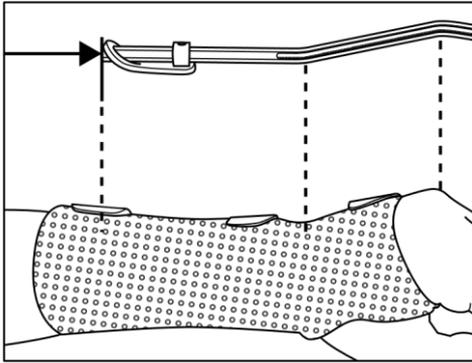

11. Pendant quelques secondes, chauffez le dessous de l'ORFITUBE ADJUSTER ainsi que l'emplacement de fixation de l'orthèse avec un pistolet thermique (faites attention à la surchauffe).

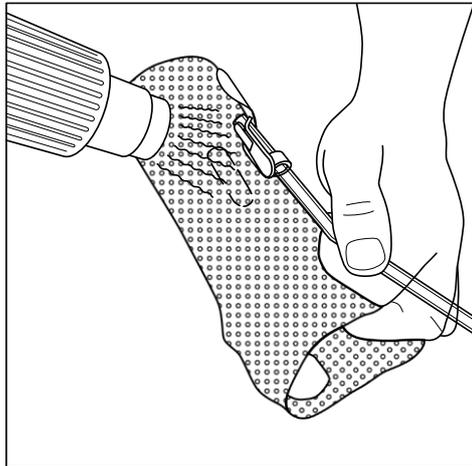

12. Appuyez fermement l'ADJUSTER sur l'orthèse dans la position souhaitée et laissez-la refroidir complètement.

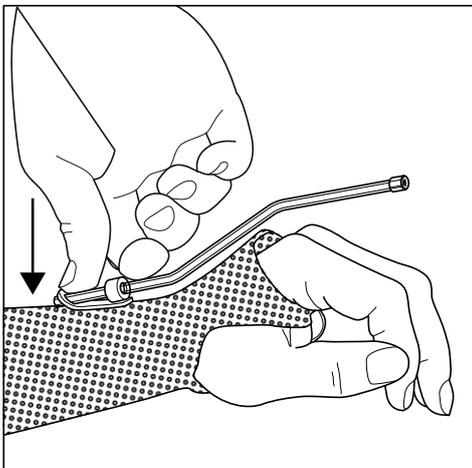

Remarque:


Après chauffage, l'ADJUSTER peut être collé aux matériaux de fabrication d'orthèses suivants:

A: Tout le matériel d'attelle ORFIT, dans le cas d'un produit NS, gratter la surface avec des ciseaux pour assurer l'adhérence.


B: il est possible de joindre l'ORFITUBE ADJUSTER sur une autre orthèse non adhérente matériaux de fabrication, en utilisant des adhésifs.

C: Dans certains cas, il peut être possible de détacher la bague de réglage et le visser directement à la orthèse.


13. Coupez l'ORFITUBE à la longueur requise avec des ciseaux épais (ou par incision et rupture).

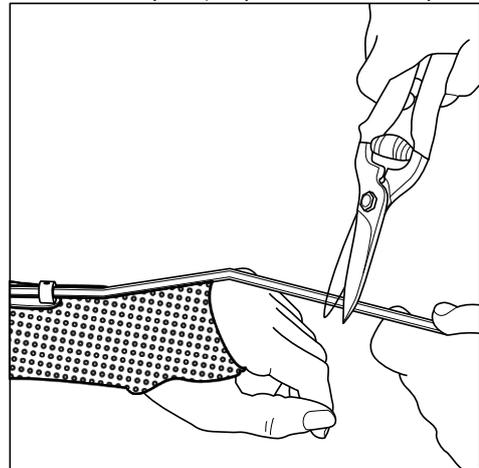

Appuyez fermement l'ORFITUBE END sur l'ORFITUBE.

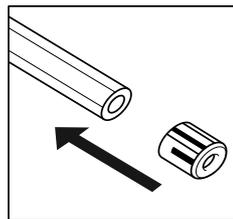

14. Insérez un élastique tressé (réf. 35312 - 35313 - 35314) équipé d'une manchette de doigt.

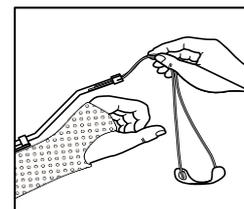


15. Donnez la tension requise à l'élastique.

D. AJUSTEMENT DE L'ORFITUBE

ORFITUBE peut être ajusté avec précision car il reste possible de faire varier le point de suspension de l'élastique pendant la réadaptation.

En desserrant la vis de réglage, vous pouvez faire pivoter et/ou translater votre ORFITUBE.

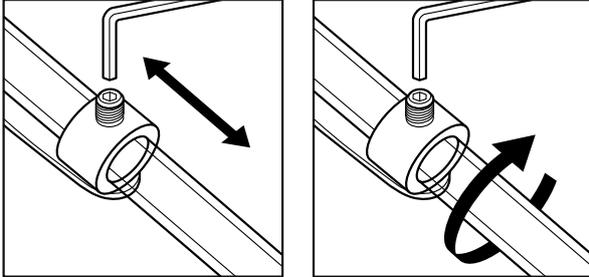

E. ENTRETIEN

ORFITUBE ADJUSTER ne nécessite aucune maintenance. Il peut être nettoyé avec de l'eau tiède et du savon.

Il n'est pas possible de stériliser un ORFITUBE ADJUSTER dans un autoclave, bien qu'il puisse être

stérilisé à l'aide d'une stérilisation en phase gazeuse. Il peut être désinfecté avec de l'alcool.

F. AVERTISSEMENTS

Attirez l'attention des patients sur les conséquences possibles de l'action incorrecte d'orthèses dynamiques.

- modification accidentelle du montage d'ORFITUBE.
- desserrage de la plaque de fixation ou du tube.

N'utilisez pas une flamme nue pour chauffer la plaque de fixation ADJUSTER.

Seulement le personnel médical qualifié est autorisé à fabriquer et à appliquer une orthèse dynamique à l'aide du dispositif ORFITUBE ADJUSTER.

G. TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

Stocker à
température minimale +10°C / +50°F
température maximale +30°C / + 95°F

Note:

Il est interdit d'apporter des modifications à ce texte sans l'accord préalable d'Orfit Industries.
DYNASYST™ et ORFITUBE™ ADJUSTER KIT sont des marques commerciales d'ORFIT INDUSTRIES N.V.



ORFIT INDUSTRIES
Vosveld 9A | B-2110 Wijnegem | Belgium
T (+32) (0)3 326 20 26
welcome@orfit.com

www.orfit.com



Ref. No. 31201FR
VERSION 2
LAST UPDATE: 05/05/2021
REVISION DATE: 05/05/2023